

HB HARRY J. **Bosworth** Company

Adesivo de Moldeira para
Impressões de Alginato

Bosworth **TAC**™

Instruções de Uso

1. Pincele adesivo fartamente na face interna da moldeira. Certifique-se de incluir as áreas periféricas da moldeira também.
2. Aguarde de 3 a 5 minutos antes de colocar o material na moldeira.
3. Na manipulação do alginato, proceda da sua maneira usual. Tac™ irá assegurar que o material de impressão fique na moldeira para uma moldagem perfeita.
4. Para limpar a moldeira após o uso, use álcool isopropílico.
5. Armazene em um local fresco e seco na temperatura de 72°F (21°C) longe da luz direta e do calor. Ponto de combustão 52°F (11°C).

PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONTATE SEU REPRESENTANTE OU:

HB HARRY J. **Bosworth** Company

7227 North Hamlin Avenue
Skokie, Illinois 60076

DentalNews®

Tecnologia que faz a diferença

Fone: (41) 3324-8120 / Fax: (41) 3322-0540

SAC. 0800 702 6002

www.dentalnews.com.br